





PETKIT™

**OCCULT BLOOD TEST
MIXED CAT LITTER**

Badanie krwi utajonej w żwirku dla kotów

INSTRUKCJA

1. Rozłóż żwirek na grubość 5-8 cm w kuwecie dla kota. (Odpowiednio zwiększaj grubość żwirku w zależności od sytuacji).
2. Sprzątaj grudki w kuwecie na czas, aby zachować jej higienę.
3. Regularnie uzupełniaj żwirek, aby utrzymać grubość 5-8 cm. Zaleca się wymianę na świeży żwirek co 2 tygodnie.
4. Jeśli kot nie może od razu przystosować się do nowego żwirku, możesz dodać niewielką ilość poprzedniego żwirku (który zawiera koci mocz lub odchody), aby stopniowo zastąpić nowy żwirek.

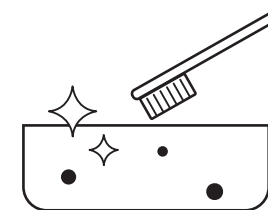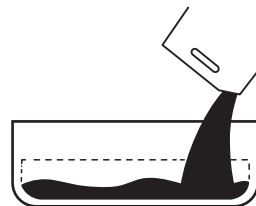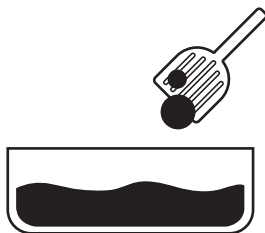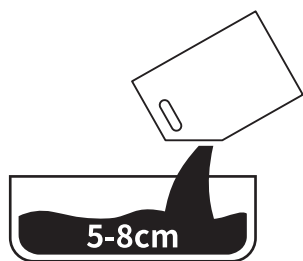

NOTATKA

1. Produktu nie można mieszać z innymi rodzajami żwirku dla kotów, w przeciwnym razie minerały w betonie wpłyną na wyniki detekcji.
2. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego lub tarcia o metal, w przeciwnym razie wpłynie to na wyniki detekcji!
3. Spłucz żwirek dla kota w małych ilościach w toalecie kilkakrotnie, aby uniknąć zatkania.
4. Produkt zawiera łatwopalny materiał roślinny. Trzymaj go z dala od ognia.
5. Produkt zawiera składniki spożywcze, ale nie jest jadalny.
6. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci.
7. Po otwarciu użyj go tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć utraty skuteczności, zamknij woreczek i umieść go w suchym i wentylowanym miejscu.
8. Produkt jest pakowany próżniowo, a przypadkowy wyciek powietrza nie wpłynie na jego stosowanie.
9. Kolor żwirku dla kota może się nieznacznie różnić w zależności od partii, co nie ma związku z jakością produktu. Możesz go swobodnie używać.

UWAGA: Jeśli w żwirku dla kota znajdują się niebieskie cząsteczki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem weterynarii