

Kroki korzystania z telefonu

Krok 1: Pobierz aplikację „Suear”

Dla iOS:

Pobierz i zainstaluj aplikację „Suear” ze sklepu App Store.

Dla Android:

Pobierz i zainstaluj aplikację „Suear” ze sklepu Google Play.

Opcjonalnie:

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.



Urządzenia kompatybilne:

Android 4.4, iOS 9.0 lub nowsze.

Telefony z systemem Android, takie jak: Samsung S7, Galaxy S6 Edge, Note8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel/XL/Pixel3, Nexus 6p, Huawei Mate9, Mate10, Mate 20 Pro, OnePlus itd.

Telefony z systemem iOS, takie jak: iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR itd.

Uwaga:


Ten model nie jest kompatybilny z komputerami.

Krok 2: Połączenie z urządzeniem


1. Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Po około 5 sekundach przejdź do następnego kroku.




Otwórz aplikację „Suear”, kliknij ikonę „Go to connect”, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami. Kliknij, aby przejść do ustawień Wi-Fi w telefonie.

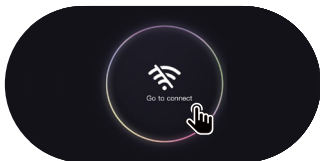

3. W ustawieniach Wi-Fi znajdź sieć „Suear-xxxx” i połącz się z nią.

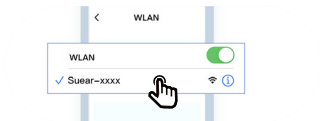

Po nawiązaniu połączenia z siecią „Suear-xxxx”, wróć do aplikacji „Suear” i kliknij ikonę domku, aby wejść do widoku urządzenia.

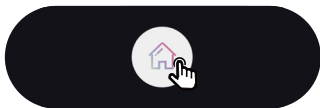


Po połączeniu się z siecią Wi-Fi urządzenia pojawią się pytania:

Dla iOS:

Aplikacja „Suear” poprosi o dostęp do urządzeń w sieci lokalnej.




Zalecenie: Kliknij „OK”.

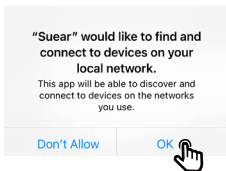


Dla Android:

Jeśli na ekranie telefonu pojawi się komunikat, że sieć Wi-Fi nie ma dostępu do Internetu, wybierz, czy chcesz pozostać w tej sieci.


Zalecenie: Kliknij „Keep” / „CONNECT” / „Decline”, w zależności od komunikatu.

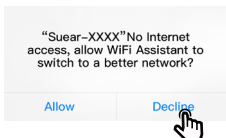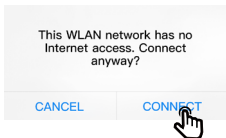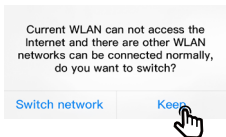

Opis interfejsu aplikacji

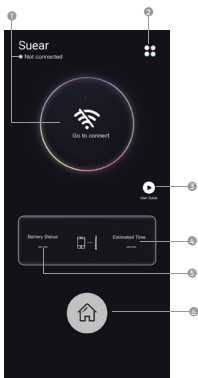

- 1 Status połączenia
- 2 Menu
- 3 Film instruktażowy
- 4 Szacowany czas
- 5 Stan baterii
- 6 Wejście do podglądu obrazu

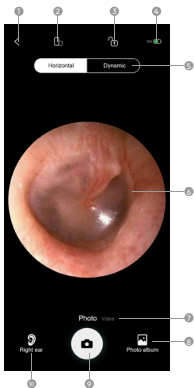

- 1 Powrót do ekranu głównego
- 2 Przełączanie widoku pionowego/poziomego
- 3 Blokada/odblokowanie ekranu
- 4 Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- 5 Zmiana trybu obiektywu
- 6 Podgląd obrazu (wizjer)
- 7 Przełączanie między trybem zdjęć i wideo
- 8 Galeria – zapisane zdjęcia i filmy
- 9 Zrób zdjęcie / nagrywanie wideo
- 10 Przełącznik lewe/prawe ucho

Ear pick accessories




Końcówka do
oczyszczania skóry




Metalowa końcówka
z silikonową osłoną



Wymienne silikonowe nakładki x5

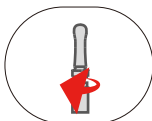

Obróć, aby zamocować
końcówkę

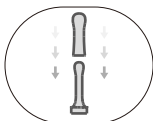

Silikonową nakładkę można
wymieniać, upewnij się, że jest
dobrze osadzona

- 1 Przed użyciem wybraną końcówkę należy przetrzeć wilgotną chusteczką lub wacikiem nasączonym alkoholem. W razie potrzeby końcówki można wymieniać według uznania.
- 2 Podczas wprowadzania końcówki do kanału usznego należy robić to ostrożnie i powoli. Obraz z kamery można śledzić w aplikacji, aby obserwować wnętrze ucha.

Rozwiązywanie problemów

Problem

Nie można zapisać zdjęć ani filmów w telefonie

Kamera nie reaguje lub nie świeci

Aplikacja się zawiesza

Sugestia

Zezwól aplikacji Suear na dostęp do zdjęć, multimediów i plików w urządzeniu.

Naładuj urządzenie.

Odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie, skanując kod QR z instrukcji.

Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi „Suear-XXXX” .

Jeśli pojawi się komunikat „This WLAN network has no Internet access. Connect anyway?” , wybierz „Connect” .

Jeśli za pierwszym razem wybrano „Cancel” , należy zapomnieć tę sieć w ustawieniach telefonu, po czym ponownie połączyć się z „Suear-XXXX” i tym razem wybrać „Connect” , aby połączenie działało prawidłowo.

W ustawieniach telefonu zezwól aplikacji Suear na dostęp do sieci Wi-Fi lub danych komórkowych (WLAN / WLAN & Cellular Data).

Zamknij aplikację i uruchom ją ponownie.

Włącz dane komórkowe w telefonie, a następnie wyłącz je.

Brak obrazu po uruchomieniu aplikacji:

Czerwona dioda w endoskopie świeci się:

Połączenie Wi-Fi zostało przerwane:

Naładuj urządzenie.

Uruchom ponownie endoskop do uszu, otwórz aplikację i ponownie połącz się z siecią Wi-Fi.

Product Parameter

Nazwa produktu: Wideo-endoskop do uszu	Częstotliwość pracy: 2.4Ghz
Standard sieci: IEEE 802.11b/g/n	Sensor obrazu: CMOS
Szybkość transmisji obrazu: 30fps	Pojemność baterii: 350mAh
Zakres temperatury pracy: 10-50 °C	Czas ładowania: 1.5h
Czas pracy baterii: Okolo 90 minut	Napięcie robocze: 3.7V-4.2V
Parametry wejściowe: 5V—0.4A	Średnica obiektywu: 4.0mm
Moc znamionowa: 0.75W	Rozdzielczość 5MP
Najlepsza odległość ogniskowania / 1.5-2cm	Port ładowania: USB2.0
Czujnik grawitacyjny 6 Axis	